



COMMENCER

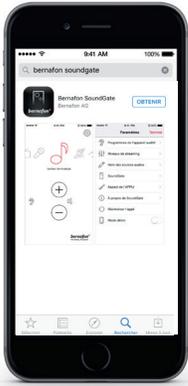

- Télécharger l'appli SoundGate de Bernafon via l'appli Store ou Google Play.
- Appairer votre téléphone avec le SoundGate 3 (voir les instructions d'appairage).
- Le SoundGate 3 doit être allumé avec la boucle portée autour de votre coup.

APERÇU DE L'APPLI

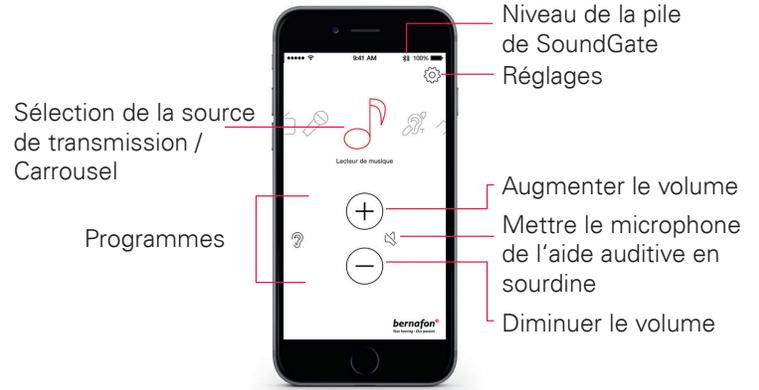

Sélection de la source de transmission / Carrousel

Programmes

Niveau de la pile de SoundGate
Réglages

Augmenter le volume
Mettre le microphone de l'aide auditive en sourdine
Diminuer le volume

AJOUTER DES ICÔNES DE PROGRAMME



- Si vous avez des programmes d'écoute supplémentaires dans votre aide auditive, vous pouvez leur assigner des icônes afin d'y accéder.
- Toucher l'icône de **Réglages**.
- Sélectionner **Programmes de l'appareil auditif**.

Programmes de l'appareil auditif >



- Sélectionner votre icône et entrer le nom de votre programme.
- Sélectionner **Enregistrer**.
- Afin de retirer un icône, entrer le signe moins.

METTRE EN SOURDINE




Pendant la transmission, les microphones de l'aide auditive peuvent être mis en sourdine afin de supprimer les sons/bruits environnants.

DÉPANNAGE

- Quitter l'app et en forcer l'arrêt. La procédure dépend du modèle de téléphone.
- Presser **Réinitialiser l'appli** afin de restaurer les réglages initiaux de l'appli.

Réinitialiser l'appli

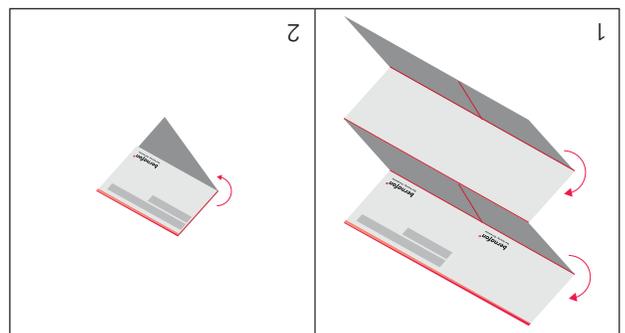

SÉLECTIONNER LA SOURCE DE TRANSMISSION




Le carrousel vous montrera toutes les sources de transmission possibles. **Toucher l'icône** de celle dont vous désirez transmettre l'audio.



Ligne terrestre

Si l'adaptateur 2 pour téléphone est appairé et est à portée, l'icône de téléphone apparaîtra dans l'appli. Accepter un appel ou y mettre fin via l'appli.

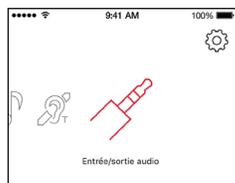


Entrée/sortie audio

Si un connecteur est inséré dans le SoundGate 3, la transmission audio démarrera automatiquement.




Bobine d'induction

Presser l'icône de télécapteur afin de démarrer/d'arrêter le transmission audio du télécapteur SoundGate 3.

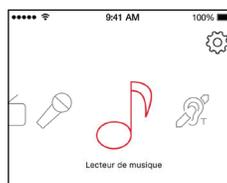


Lecteur de musique

Presser l'icône de lecteur de musique afin de démarrer/d'arrêter le transmission audio de votre appareil audio.

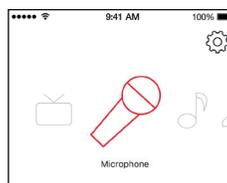

Microphone

Presser l'icône de microphone afin de démarrer/d'arrêter le transmission audio du Mic SoundGate.

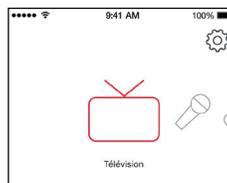

Télévision

Presser l'icône de télé pour démarrer/arrêter la transmission audio de l'adaptateur télé.

RÉGLAGES


Programmes de l'appareil auditif

Assigner des icônes pour accéder à des programmes d'écoute supplémentaires.



Niveaux de streaming

Régler vos niveaux de volume préférés pour les appareils appairés avec votre SoundGate 3.

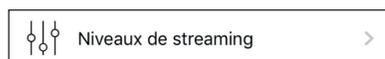

Nom des sources audios

Personnaliser/éditer le nom des appareils appairés.



SoundGate

Sélectionner différents réglages afin de personnaliser l'utilisation quotidienne des téléphones et de SoundGate 3.



Aspect de l'APPLI

Choisir entre un fond noir ou blanc pour l'appli. Pour les deux couleurs, des contours d'icônes réguliers ou gras peuvent être sélectionnés via l'option de contraste.



À propos de SoundGate

Voir l'état actuel de la pile de SoundGate 3 et le nombre d'appareils et de programmes connectés.



Réinitialiser l'appli

Réinitialiser l'appli selon les réglages par défaut.



Mode démo

Devenir familier avec l'appli sans devoir se connecter à SoundGate 3.

